

**CE** A marca CE é uma marca de conformidade protegida da União Europeia. Os produtos marcados com este símbolo cumprem os requisitos da Directiva 93/42 /CEE relativa aos Dispositivos Médicos.

A pasta Elefix EEG é projetada para anexar eléttodos Nihon Kohden em medições EEG. Consulte o manual do equipamento que utiliza com esta pasta. Siga as instruções do médico para usar esta pasta.

#### **PRECAUÇÃO**

- Use esta pasta apenas para medições EEG.
- Se a pasta entrar em contacto com os olhos ou boca, imediatamente lave bem com água e consulte um médico.
- Se erupção cutânea, vermelhidão, comichão, inchaço aparecerem anormalmente na pele, lave imediatamente a pasta com água e não a utilize.
- Não deixe a pasta perto de pacientes ou no alcance de crianças.
- Se a pasta for ingerida, consulte um médico.
- A lei de estados unidos restringe este produto à venda por ou por ordem de um médico.

#### **NOTA**

- Não utilize a pasta em feridas ou pele inflamada.
- Armazene a pasta longe da luz solar directa e de temperaturas entre -10°C e +40°C.
- Aperte a tampa para prevenir que a pasta seque.
- Não utilize pasta seca porque a forma de onda do EEG não pode ser gravada.
- Não utilize a pasta depois de passar a data de validade.

#### **Modo de aplicação**

1. Limpar a pele no local do eléttrodo com um cotonete humedecido com álcool. Limpe o local com gaze seca para remover o álcool da pele.
2. Aplique uma pequena quantidade de pasta no local do eléttrodo limpo. Evite espalhar a pasta demasiado fina ou criar um espaço grande. Limite a área com 1 cm de diâmetro.
3. Aplique uma pequena quantidade de pasta no eléttrodo, coloque-o no ponto da pele previamente colado e pressione-o suavemente.
4. Tape o eléttrodo com uma gaze pequena e pressione-a a volta do eléttrodo. Segure o eléttrodo com fita cirúrgica.

#### **Depois de utilizar**

#### **PRECAUÇÃO**

- Não use lâmpada ou qualquer abrasivo para lavar os eléttodos.
- Não permita que nenhuma pasta permaneça nas pontas dos eléttodos porque isto pode fazer com que as pontas fiquem com ferrugem.

1. Limpe cuidadosamente a pasta da pele com um cotonete humedecido com água morna.
2. Imergir os eléttodos em água corrente
3. Limpe os eléttodos suavemente, com cuidado para não riscar as superfícies
4. Seque cuidadosamente os eléttodos com um pano seco e macio.

## Composição

Pasta: Água, fosfato álcool cetílico polioxietileno, glicerina, carbonato de cálcio, petrolato líquido, propileno glicol, álcool de lanolina, cloreto de sódio, hidróxido de sódio polioxietileno lanolina hidrogenada, dietanolamida de ácido gordo de coco, álcool cetoestearílico de polioxietileno, álcool cetílico polioxietileno, dibutil hidroxitolueno, para-hidroxibenzoato de metilo, para-hidroxibenzoato de propilo

Z-401 CE: Recipiente: Polipropileno, Cap: Polietileno  
Z-181BE/JE: Tubo: Polietileno Cap: Polipropileno

## Disposição

Siga as leis locais para descartar a pasta

## Temperatura ambiente

Temperatura de uso: 10 a 40°C (50 a 104°F)  
Temperatura de armazenamento: -10 a +40°C (14 a 104°F)

- O manual Japonês é publicado de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar no Japão. Os conteúdos dos manuais Inglês e Japonês podem ser diferentes.
- Todo o conteúdo deste manual está protegido por direitos de autor da Nihon Kohden. Todos os direitos estão reservados.



Manufacturer

NIHON KOHDEN CORPORATION

1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8500, Japan Phone +81 3-5996-8036 Fax +81 3-5996-8100

NIHON KOHDEN AMERICA, INC.

15353 Barranca Parkway, Irvine, CA 92618, U.S.A. Toll-free +1-800-325-0283 Phone +1 949-580-1555 Fax +1 949-580-1550



European Representative

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH

Raiffeisenstrasse 10, D-61191 Rostbach, Germany Phone +49 6003-827-0 Fax +49 6003-827-599

